

## 仕様書

### LapaSta® ラパスタ

Product No      LapaSta® ラパスタ

高さ            210mm  
吸盤径         $\phi$ 70mm  
重量            175g(1本)  
セット         2本

#### 【ご注意】

- ・臨床では使用できません
- ・ねじで固定後に強引にアームを動かさないでください
- ・吸盤には離型剤・オイル・酸などつけないでください
- ・吸盤には人の汗などに弱い材質なので、必要のない場合以外は触れないでください
- ・接着面が艶消し状態の場合、設置はできません
- ・把持部を開いた状態でニードルホールを抜き差ししないでください
- ・外径 $\phi$ 5mm以上の持針器を使わないでください
- ・吸盤で固定した状態で強引に引っ張らないでください
- ・ニードルホールに持針器を挿した状態で離れないでください
- ・ニードルホールのゴム板に傷をつけると裂けます
- ・ウェットラボでの使用はできません
- ・使用後は設置面から外し、ねじを緩めて保管してください

#### 【ご使用方法】

1. レバーが解除になっていることを確認してください(レバーが上向き)
2. 設置面にパウダー、オイル、酸などの薬品が付いていないことを確認してください
3. 光沢面に吸盤を付け、レバーを下げて固定してください
4. アームの角度が決まりましたら、ねじを締めて固定してください
5. 使用後はレバーを上げ、吸盤と設置面に爪を少し入れるとラパスタは設置面から取れます
6. ねじを緩めて保管してください



# JPTC



日本高分子技研株式会社

〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-2-14  
日本橋KNビル4階  
電話：03-5201-3735  
URL <http://www.jptc.co.jp>  
Facebook <https://www.facebook.com/japanpolymer>  
お問合せ：井上雅司 inoue@jptc.co.jp



JAPAN POLYMER TECHNOLOGY